



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ SHERAFAVORIT

Применение

Супертвердый гипс, класс IV, DIN EN ISO 6873

Супертвердый гипс, усиленный пластмассой для работы с имплантатами, секционными и мастер-моделями для коронок и мостов, внутренних и наружных вкладок и применения технологии окрашивания.

Обработка

порошок 100 г.: 20 мл дистиллированной воды (среднее значение).

Объем воды может быть увеличен или уменьшен в пределах 1,5 мл. При меньшем объеме жидкости гипс будет прочнее, но срок службы сократится. Большой объем жидкости дает обратный эффект.

Необходимо обеспечить достаточное количество стоматологического гипса только для приготовления смеси для трех-четырех моделей (это важно для кристаллизации!).

Стоматологический гипс насыпают в химическую ёмкость для приготовления смеси, а затем добавляют воду. Медленно перемешивают вручную до тех пор, пока порошок и жидкость не смешаются надлежащим образом.

Затем приготавливают смесь в условиях вакуума в течение 45 сек. Приготовление смеси начинают после создания полного вакуума. Неиспользуемые ёмкости для приготовления смеси всегда оставлять заполненными водой.

Технические данные (применимо к пропорции смешивания 100 г: 20 мл и приготовлению смеси в условиях вакуума):

Твердость по Бринеллю через 2 часа (МПа; Н/мм ²).....	300
Твердость по Бринеллю через 24 часа (МПа; Н/мм ²).....	320
Прочность на сжатие через 1 час (МПа; Н/мм ²).....	57 (8,265 фунт/кв. дюйм)
Установленное расширение (%).....	0,10
Полная устойчивость (мин).....	30 - 40
Время работы (мин).....	6,0 - 7,0

Срок хранения

Не менее 24 месяцев при хранении герметически закрытым и в условиях отсутствия влаги.

Гарантия

Компания SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG сертифицирована в соответствии с требованиями DIN EN ISO13485 и гарантирует безупречное качество своей продукции, благодаря тщательной системе контроля качества.

Наши инструкции по применению основаны на результатах испытаний в нашей лаборатории. Приведенные технические данные гарантируются только в том случае, если процесс выполняется, как указано. Пользователь самостоятельно несет ответственность за обработку продукции. Мы не несем ответственности за ошибочные результаты, так как SHERA не оказывает влияние на обработку. Тем не менее, возможные претензии в отношении ущерба относятся только к стоимости продукции.

!

Данная инструкция по применению является переводом инструкции с английского языка на русский язык. Скачать оригинальный текст инструкции можно на официальном сайте производителя:
https://shop.shera.de/media/pdf/10106/ga_sherafavorit_englisch.pdf

Перевод текста выполнен специально для компании Штрюмбергер-Дентал. Любое копирование и изменение текста возможно только при получении разрешения от компании Штрюмбергер Дентал.

www.stromberger-dental.ru

2020